

電源を ON/OFF する

電源 / 回転速度選択キーを 1 秒以上長押しします。

回転速度の設定



- ⑤ 2,500min⁻¹
- ④ 2,000min⁻¹
- ③ 1,500min⁻¹
- ② 1,000min⁻¹
- ① 500min⁻¹

電源 ON 時に電源 / 回転速度選択キーを押すと回転速度を選択できます。一度押す度に回転速度が 1 ステップ上昇し LED に表示します。キーを押す毎に①→②→③→④→⑤→①とループします。

作動させる

ON/OFF キーを押すと回転が始まります。

パターン 1 ON/OFF キーを押すたびに、回転 / 停止を行う。(正回転時のみ)

パターン 2 ON/OFF キーを押し続けると押し続けている間だけ回転し、離すと停止。

回転の切り換え

正逆切換キーを押すと、逆回転(反時計回り)に回転方向が切り換わります。もう一度押すと、正回転(時計回り)に戻ります。ただし、回転中は回転方向の変更はできません。

バッテリー残量


LED 2 個点灯: 満充電もしくはそれに近い状態です。

LED 1 個点灯: 約 30~80% の残量です。

LED 1 個点滅: 約 30% 以下の残量です。

コントラアングルヘッドの注油

- 注油は、コントラアングルヘッドのみ行ってください。
- 注油は治療後、またはオートクレーブ滅菌前に行ってください。
- コントラアングルヘッドの回転軸のネジ部分にペースト等が入り込んでしまった場合はヘッド先端部のみを超音波洗浄器にて洗浄することをお奨めします。洗浄後は必ず注油してください。
- 弊社パナスプレープラス（別売品）にF-タイプスプレーノズルを装着し、コントラアングルヘッド後部にねじ込み2～3秒注油してください。

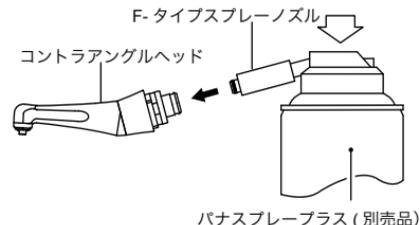

エラー表示

故障、過負荷、断線、使用上の誤りなどにより異常が発生し、機器が停止した場合、操作パネルの逆回転表示LEDの点滅と回転速度表示部のLEDの点灯でエラー表示します。

エラーが表示された場合、電源を入れ直し、同様のエラーが表示されるか確認してください。再度エラーが表示された場合、右の表を参照して対処してください。

バッテリーパックの交換は取扱説明書(8.保守 8-1バッテリーパックの交換)をご参照ください。

逆回転	回転速度	エラーの内容	対 処
○	⑤④③②①	セルフチェックエラー	販売店まで連絡してください
○	⑤④③②●	過電流	負荷を取り除いてください。
○	⑤④③②①	過電圧	販売店まで連絡してください。
○	⑤④●③②①	モータ加熱	しばらく放置し、冷ましてから使用してください。
○	⑤④③②●	バッテリー異常	バッテリーパックを交換してください。
○	⑤④●③②①	バッテリー低電圧	充電またはバッテリーパックを交換してください。
○	⑤④●③②①	バッテリー高電圧	販売店まで連絡してください。
○	⑤④●③②①	使用温度範囲外	使用温度範囲で使用してください。
○	⑤④●③②①	バッテリー異常発熱	適正な使用環境で充電してください。またはバッテリーパックを交換してください。他のバッテリーパックでも起こるようであれば回路の故障が考えられますので販売店まで連絡してください。

LED表示：●点灯 ○消灯 ◎点滅